

⚠ **ADVARSEL!** Utfør aldri målinger på et barn som har pacemaker, kontinuerlig glukosemonitor eller en implantert eller kroppsbåret elektronisk enhet.

⚠ **ADVARSEL!** Ventica® skal kun brukes som beskrevet i Foreldreguiden. Har du spørsmål eller funderinger, kontakt helsepersonellet som veiledet deg om hvordan målingen skulle utføres.

⚠ **ADVARSEL!** Enheten må ikke bli våt. Dusj og bad er forbudt når barnet har på seg Ventica®.


⚠ **ADVARSEL!** Alle andre elektroniske enheter inkludert babymonitører og mobiltelefoner bør befinne seg minst 30 cm fra barnet i løpet av målingen.

⚠ **ADVARSEL!** Oppbevar Ventica® utilgjengelig for barn og kjæledyr.

⚠ **ADVARSEL!** Elektrodene er kun til engangsbruk og skal ikke brukes flere ganger.

Bytte av batteri

Trykk på markeringen og skyv lokket av. Bytt ut batteriene med nye, vanlige AAA-batterier. Skyv lokket tilbake på plass.

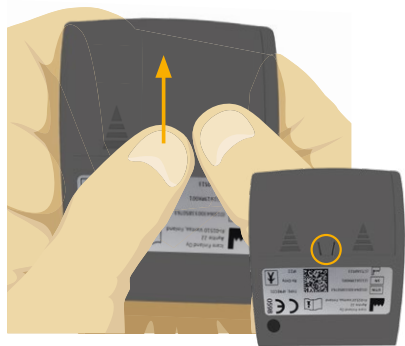

Feilsøking

Registreringsenheten fortsetter å blinke med oransje lys

Batteriene er tomme. Bytt ut batteriene som beskrevet hvis du ønsker å fortsette å utføre målinger.

Jeg skal starte en ny måling, men indikatorlampen blinker oransje når jeg trykker på knappen.

Enheten måler fortsatt og ble ikke slått av ordentlig på morgenen. Slå av registreringsenheten nå (Se Avslutt målingen). Etter dette kan du starte en ny måling.

Ventica


Breathe easier

Foreldreguide



Ventica

CE 0598

 Icare Finland Oy
Äyritie 22
FI-01510 Vantaa, Finland

Revenio Research Oy, Vantaa, Finland
www.ventica.net


VENTICA-022-NO-11

Foreldreguide

Ventica® introduksjon

Du skal ha:

1. Ventica® Registreringsenhet for pustemåling på natten

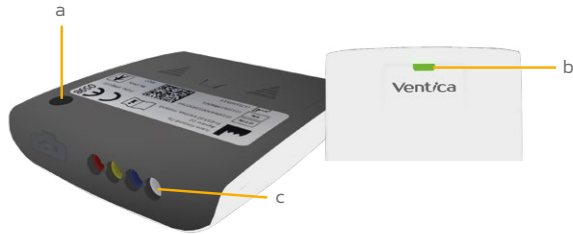

a) Aktiveringsknapp, b) Indikatorlamper i flere farger, c) Fargekodede tilkoblingspunkter for elektroder

2. Fargekodede, Ventica® -elektroder til engangsbruk
3. Ventica® -t-skjorte til oppbevaring av enheten
4. To AAA-batterier
5. Kirurgteip for å sikre at elektrodene er godt festet.

Farger på indikatorlamper

- • • Blinkende blått med lengre intervall
= enheten er aktiv og måler
- — Kontinuerlig blinkende oransje
= Batteriene er tomme og må byttes ut

Å bruke Ventica® hjemme

Les delen som er aktuell for deg, enten Automatisk måling eller Å starte målingen hjemme

1. Automatisk måling

Før målingen

Målingen er startet av helsepersonell. Hvis Ventica® er plassert på barnet, er alt klart. Hvis ikke, se Å feste Ventica®.

- • • Indikatorlampen blinker blått med lengre intervaller når målingen pågår.

Etter målingen

Fjern enheten: Koble elektrodene fra enheten, kle av barnet t-skjorten og fjern elektrodene fra huden.


Hvis målingen fortsetter neste natt, se Å feste Ventica® på kvelden.

NB: Bruk et nytt sett med elektroder for hver måling.

2. Å starte målingen hjemme

Målingen kan startes når som helst på kvelden før barnet legger seg.

a) Start målingen

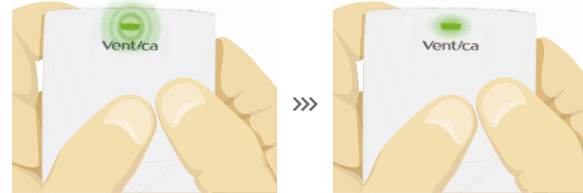

Trykk på knappen på baksiden av enheten i 5 sekunder

Slipp når lampen slutter å blinke

Registreringsenheten piper og indikatorlampen blinker grønt når den er slått på. Hvis ikke, prøv igjen.

- • • Indikatorlampen blinker blått med lengre intervaller når målingen pågår.

b) Fest elektrodene godt i armhulene på barnet, slik det er beskrevet, se Å feste Ventica®

c) Avslutt målingen på morgenen

Fjern enheten: Koble elektrodene fra enheten, kle av barnet t-skjorten og fjern elektrodene fra huden.

Avslutt målingen:



Trykk på knappen på baksiden av enheten i 5 sekunder


Slipp når lampen slutter å blinke

Enheten piper og indikatorlampen blinker oransje når den er slått av. Hvis ikke, prøv igjen.

Hvis målingen fortsetter flere netter, gjenta alle trinnene: start målingen, fest Ventica® og avslutt målingen.

NB: Bruk et nytt sett med elektroder for hver måling og bytt ut batteriene etter 2 netter.

Å feste Ventica®

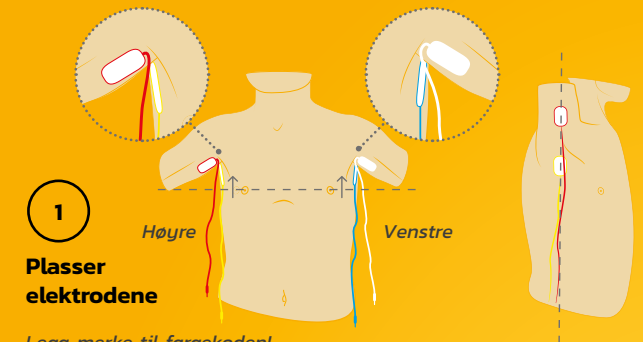

Plasser elektrodene

Legg merke til fargekoden!
Vær oppmerksom på at elektrodene må plasseres høyt opp i armhulene. Bruk ekstra kirurgteip for å sikre at elektrodene er godt festet.




2 Kle på t-skjorten

3 Koble ledningene til enheten



4 Plasser enheten i lommen

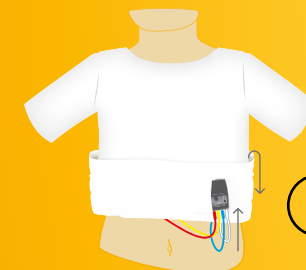

Barnet kan fortsette å bevege seg fritt med enheten på. Det er viktig at elektrodene er godt festet når barnet legger seg.