

Etter målingen

Artikler som trengs:

- ❏ Ventica® Recorder
- ❏ USB-kabel
- ❏ Datamaskin med tilgang til Ventica® Analytics-programvare og med Ventica® Driver installert

5 FORBEREDELSE

- 5.1 Koble Ventica® Opptaker til datamaskinen med USB-kabelen
- 5.2 Åpne Ventica® Analytics-programvaren og logg inn

6 DATAOVERFØRING OG ANALYSE

6.1 Last opp dataene

- Velg HENT DATA FRA ENHETEN på Ventica® Analytics-hjemmesiden.
- Velg START OVERFØRING for å starte opplastingen. Vent til meldingen Dataene ble hentet vises før du kobler registreringsenheten fra USB-kabelen.

6.2 Dataanalyse

- Dataanalysen starter automatisk når dataene er lastet opp.
- Resultatene er klare når statusen er Rapport tilgjengelig. Dette kan ta flere timer.

6.3 Resultater

- Åpne resultatrapporten ved å klikke på den aktuelle meldingen på hjemmesiden.
- Se avsnitt 7.2 i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal tolke resultatet.
- Lagre rapporten i henhold til organisasjonens forskrifter.



Rådfør deg med bruksanvisningen

Ventica

Breathe easier

Hurtigveiledning for Ventica®



Ventica

CE 0598

Icare Finland Oy
Ayratie 22
FI-01510 Vantaa, Finland

Revenio Research Oy, Vantaa, Finland
www.ventica.net

VENTICA-001-NO-2.0

Hurtigveiledning

Før målingen

Artikler som trengs:

- 📶 Ventica® Recorder
- 📶 Ventica® Electrodes, 1 sett for hver natt
- 📶 Ventica® t-skjorte
- 📶 To AAA-batterier
- 📶 USB-kabel
- 📶 Datamaskin med tilgang til Ventica® Analytics-programvare og med Ventica® Driver installert
- 📶 Transportetui
- 📶 Foreldreguide
- 📶 Hudtape

1 FORBEREDELSE AV APPARATET

- 1.1 Skifte ut batteriene i Ventica® Opptaker
- 1.2 Koble Ventica® Opptaker til datamaskinen med USB-kabelen
- 1.3 Åpne Ventica® Analytics-programvaren og logg inn

Det blå indikatorlyset på Opptaker som lyser konstant, og en grønn prikk på Ventica® Driver-ikonet på PC-en angir at tilkoblingen er opprettet.


2 INITIALISERING AV MÅLING

- 2.1 Åpne den relevante pasientoppføringen på Ventica® Analytics
 - For nye pasienter følger du banen HJEM -> NY PASIENT. Angi pasientinformasjonen og klikk på OPPRETT for å bli sendt til menyen NY MÅLING.
 - For pasienter som returnerer, følger du banen HJEM -> VELG PASIENT. Klikk på raden som tilsvarer personen i pasientlisten. Velg NY MÅLING fra pasientmenyen.
- 2.2 Velg ønsket målingsmodus i menyen NY MÅLING
 - AUTOMATISK: målingen starter automatisk og går over 1 eller 2 netter. Hvis du vil endre varigheten, klikker du bare på 1 NATT eller 2 NETTER.
 - ENHETSKNAPP: Omsorgspersonen starter målingen ved å trykke på knappen til enheten, og fester enheten på barnet. Hvis denne modusen velges, fortsetter du direkte til trinn 4.1.

3 VALGFRIE TRINN FOR AUTOMATISK MÅLINGSMODUS

3.1 Feste elektrodene til pasienten

- Fest elektrodene til pasienten mens kablene henger løst. Elektrodene er fargekodet og skal plasseres nøyaktig høyt oppe i armhulene, over brystvortelinjen.
- Sett på hudtappen for å sikre at elektrodene blir sittende.

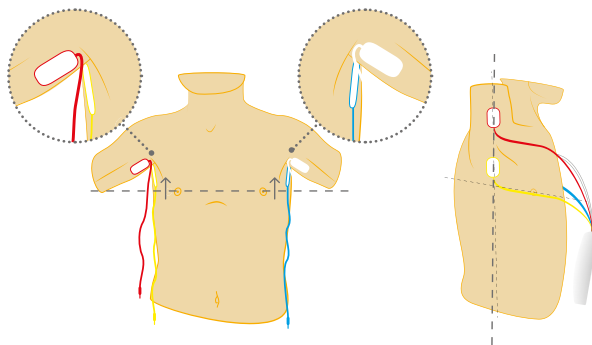

Legg merke til fargekodingen!

Vær oppmerksom på at elektrodene skal plasseres høyt opp i armhulene.


3.2 Kle pasienten i Ventica® t-skjorte og brett ned den nederste delen for å avdekke lommen

3.3 Koble elektrodene til Ventica® Opptakerer ved hjelp av fargekodingen, og plasser enheten i lommen

Opptakeren er nå koblet til både pasienten og datamaskinen.

3.4 Valgfritt: Klikk på KONTROLLER SIGNALER for å kontrollere signalkvaliteten

- Diagrammet for elektrodeplassering vises. Kontroller at elektrodekablene er koblet som vist i diagrammet, og klikk deretter på LUKK.
- Observer formene på EKG- og IP-signalene og sikre at begge viser et gjentakende mønster. Klikk på STOPP SIGNALKONTROLL når alt ser bra ut.

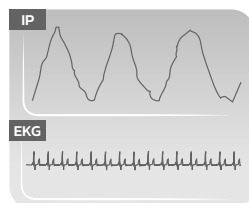

De forventede formene på IP- og EKG-signalene

4 FULLFØRE FORBEREDELSENE

4.1 Klikk på KOBLE FRA ENHETEN på programvaren. Vent til meldingen Måling igangsatt! Det er nå trygt å koble fra enheten vises, før du kobler registreringsenheten fra USB-kabelen.

- Hvis AUTOMATISK modus ble valgt, plasserer du registreringsenheten forsiktig i Ventica® Shirt-lommen og bretter ned den nederste delen av skjorta.
- Hvis ENHETSKNAPP-modus ble valgt, pakker du inn enheten i transportetuiet.

4.2 Presentere foreldreguiden

- Gå gjennom de relevante delene av veiledningen med omsorgspersonen. Merk av i boksen ved siden av det relevant avsnittet i foreldreguiden for å sikre at omsorgspersonen vet hvilken målingsmodus (automatisk eller enhetsknapp) som ble valgt.
- Hvis ENHETSKNAPP-modus ble valgt, forklarer du hvordan de starter og stopper målingene.
- Hvis målingen går over flere netter, bør omsorgspersonene feste enheten på nytt. Sikre at de har den nødvendige kunnskapen til å fortsette målingene.

4.3 Gi familiene transportetuiet, inkludert de ekstra artiklene som er nødvendige hjemme. Hvis målingen går over flere netter, må du inkludere flere sett med elektroder.

